

		Projektnamn	Dnr	Sida 1
Skapad 2020-10-23	Författare Anna Löhnert, Anette Danielsson	Förvaltning Socialförvaltningen	Dokumenttyp Instruktion	

Rengöring och underhåll av hjälpmedel

- För att förlänga hjälpmedlens livslängd och funktion är det viktigt att regelbundet rengöra hjälpmedlen hos våra brukare. Ska rengöras var fjärde vecka, oftare vid behov. Det är varje enhets ansvar att se till att detta utförs och meddela hjälpmedelsassistent om det är något som är trasigt och behöver bytas ut.
- Hjälpmedel rengörs med varmt vatten och diskmedel eller såpa. Det går bra att tvätta t ex en rullstol i duschen och använda en mjuk borste eller svamp.
- Elektroniska hjälpmedel t.ex. lyftar, sängar, gåbord m fl. torkas av med fuktig trasa. Använd ytdesinfektionsmedel efter rengöring. Tänk på att höja upp sängarna och torka av även under. Det samlas mycket damm på elektroniken. Kontrollera samtidigt att sladdarna är hela.
- Följ tvättråden på hjälpmedlet. Använd aldrig sköljmedel! Hängtorka eller torka på låg värme i torkskåp.
- Tvätta/torka av sittdynorna vid rengöring av överdragen. Kontrollera att dynan är hel och fräsch.
- Vid smitta och rengöring av hjälpmedel var god kontakta Rehab.

Vid frågor kontakta hjälpmedelsassistent, tfn: 0486 - 33 704